

Návod k použití Chrániče bradavek



Chrániče bradavek chrání bolavé a rozpraskané bradavky před dalším odíráním. Nejčastější příčinou rozpraskaných bradavek je nesprávné přiložení miminka při kojení nebo kvasinková infekce v ústech dítěte (moučnivka), přenosná i na matčin prs. Diskrétní tvar a flexibilní membrána zaručují pohodlné nošení. Jemný silikon je velmi šetrný k pokožce. Ventilační otvory umožňují cirkulaci vzduchu a tím zabraňují zvyšování vlhkosti a urychlují proces hojení. Unikající mléko je následně sbíráno v misce. Chránič používejte během jednotlivými kojícími cykly. Jestliže se rozpraskání zhoršuje nebo přetrvává, vyhledejte pomoc lékaře nebo laktačního odborníka.

Montáž a použití:

Přitlačte silikonovou membránu na víčko. Ujistěte se, že membrána sedí těsně kolem celého obvodu víčka. Složený chránič vložte do podprsenky tak, aby bradavka byla přesně ve středním otvoru chrániče. Ventilační otvory musí směřovat nahoru. Doporučujeme používat mateřskou podprsenku, která je prostornější a nošení chráničů je pohodlnější. Jestliže během nošení chráničů uniká z bradavky mléko, vložte do chrániče kousek tkaniny. Ujistěte se, že tkanina nezakrývá ventilační díry. Upozornění: Mléko z tkaniny nepoužívejte ke krmení.

Čištění a sterilizace:

Před prvním použitím a následně 1x denně:

Rozložené části chrániče vložte do malého hrnce se studenou vodou. Doporučujeme použití destilované vody. Pokud použijete vodu z vodovodu, přidejte do ní trochu kyseliny citrónové. Zabráníte tak vzniku vodního kamene. Přiveďte vodu k varu a nechte vařit asi 3 až 5 minut. Poté díly vytáhněte z vody a opláchněte je. Nechte usušit na suchém čistém hadříku.

Po každém použití:

Oddělené části umyjte v jemném čistícím roztoku, opláchněte ve studené vodě a usušte na čistém hadříku.

Chránič může být čištěn v myčce na nádobí nebo autoklávován.

Výhradní zástupce a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a, 612 48 Brno

Česká republika

Tel.: 541 321 095

Fax: 541 321 096

<http://www.dnformed.cz> (www.medela.cz)

email:dnformed@dnformed.cz