

Návod k použití

Comfort - prsní nástavec



Prsní nástavec Comfort je velmi šetrný k pokožce a v kombinaci s odsávačkou mateřského mléka Medela zaručuje pohodlné a příjemné odsávání mateřského mléka.

1. Prsní nástavec Comfort se skládá ze 2 částí: rámu a flexibilního prsního krytu (viz. obr. č.1). Před montáží se ujistěte se, že jsou obě části suché, aby po smontování pevně držely.
2. Rám nástavce umístěte na stůl tak, aby trychtýř směřoval nahoru. Trubicovitou část prsního krytu vložte do trychtýře (viz. obr.č. 2).
3. Volné části nástavce protáhněte dolů (viz. obr. č. 3).
4. Vnější okraj prsního krytu přetáhněte přes okraje nálevky. Volné konce krytu ještě jednou stáhněte, abyste se ujistili, že vnitřní část krytu správně drží.

Důležité:

Nejdříve umístěte nástavec tak, aby bradavka směřovala do středu. Zvláště důležité je těsné přisátí k prsu (viz obr.č. 5). Poté zapněte odsávačku. Držte nástavec v trubicovité části pomocí prostředníku a ukazováku.

Demontáž a čištění

Nástavec lehce demontujete pod proudem vody. Čistěte v myčce na nádobí nebo vařte přibližně 3 minuty (k zabránění vzniku vodního kamene přidejte trochu octa).



Flexible shield
Flexibla silkontratten
Flexibele borststuk



Frame
Tratthållaren
Houder

1



2



3



Výhradní zástupce pro ČR:
DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a

612 48 Brno

Česká republika

Tel.: 541 321 095

Fax: 541 321 096

<http://www.dnformed.cz> (www.medela.cz)

email:dnformed@dnformed.cz