

Návod k použití Formovače bradavek



Formovače bradavek připravují ploché a vpáčené bradavky na kojení. Pokud jsou Vaše bradavky ploché nebo vpáčené, může mít miminko problém se správným přísátím ke dvorci a bradavce. Pokud dítě necítí v ústech bradavku, pouští se prsu a neustále hledá. Jemný tlak silikonového formovače na dvorec vytlačí bradavku ven. Formovače můžete používat již v těhotenství (nejlépe od 6.měsíce). Noste formovač nejdříve 1 hodinu denně a postupně nošení prodlužujte až na 8 hodin denně, po porodu asi 30 minut až hodinu před kojením. Jemný silikonový materiál a diskrétní tvar umožňují nenápadné a pohodlné nošení.

Montáž a použití:

Přitlačte silikonovou membránu na víčko. Ujistěte se, že membrána sedí těsně kolem celého obvodu víčka. Složený formovač vložte do podprsenky tak, aby bradavka byla přesně ve středním otvoru formovače. Ventilační otvory musí směřovat nahoru. Doporučujeme používat mateřskou podprsenku, která je prostornější a nošení formovačů je pohodlnější. Jestliže během nošení formovačů uniká z bradavky mléko, vložte do formovače kousek tkaniny. Ujistěte se, že tkanina nezakrývá ventilační díry. Upozornění: Mléko z tkaniny nepoužívejte ke krmení.

Čištění a sterilizace:

Před prvním použitím a následně jednou denně:

Rozložené části formovače vložte do malého hrnce, který naplníte studenou vodou. Doporučujeme použití destilované vody. Pokud použijete vodu z vodovodu, přidejte do ní trochu kyseliny citrónové. Zabráníte tak vzniku vodního kamene. Přiveďte vodu k varu a nechte vařit asi 3 až 5 minut. Poté části vyjměte a opláchněte. Nechte usušit na suchém čistém hadříku.

Po každém použití:

Oddělené části umyjte v jemném čistícím roztoku, opláchněte ve studené vodě a usušte na čistém hadříku.

Možnost čištění v myčce nebo autoklávu.

Výhradní zástupce a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a

612 48 Brno

Česká republika

Tel.: 541 321 095

Fax: 541 321 096

<http://www.dnformed.cz> (www.medela.cz)

email: dnformed@dnformed.cz