

## Maximální hygiena - ochrana personálu i pacienta

Jednorázový sběrný systém splňuje dvě základní potřeby – jednoduchou manipulaci a vysokou bezpečnost.

### Jednoduchá manipulace

- zřetelné barevné rozlišení objemu vaků i lahví zabraňuje jejich možné záměně
- pojistná spona fixuje láhev v držáku - při vyjmutí vaku zůstává láhev bezpečně uchycena v držáku
- vakuový vstup v integrovaném držáku láhve umožňuje, aby během výměny vaku zůstala vakuová hadice stále propojena
- úhlová spojka patientské hadice o průměru až 11 mm umožňuje odsátí velkých částic a zabraňuje zalomení hadice
- dva úchyty na vaku umožňují snadnou obsluhu pravou nebo levou rukou
- polykarbonátovou láhev lze desinfikovat až na 100 °C
- vaky s krystalizatorem nebo bez něj (krystalizátor způsobuje ztuhnutí sekretu)
- láhve lze propojit do série pomocí konektorů nebo přepínače vaku
- flexibilní - možnost dodání vaku s PVC odsávací hadicí, přerušovačem sání - FingerTipem nebo stop ventilem

### Vysoká bezpečnost

- dvouvrstvý vak zajišťuje maximální pevnost a zabraňuje prostupování zápachu
- materiál Polyamid/Polyethylen
- možnost použití vaku u jednoho pacienta až 4 dny (ekonomická úspora)
- skladovatelnost 3 roky od data výroby uvedeného na obalu/krabici i víčku vaku
- barva značení: 1,5 l systém – žlutá, 2,5 l systém – oranžová
- bez krystalizátoru nebo s krystalizatorem

### MedelaVak obsahuje

víčko, patientský vstup s úhlovou spojkou a ucpávkou, vstup pro sériové propojení a ucpávku, 2 úchyty, ochranný kryt proti přesátí, zpětný ventil s navigací kapaliny zabraňující zpětnému toku sekretu a snižující pěnění, filtrační komoru, předfiltr, který zabraňuje průchodu kouře a částic aerosolu do filtru, bakteriální a hydrofobní filtr s lapačem nečistot.



# Modulární a kompatibilní

Jednoduché použití při zachování maximální bezpečí


## LÁHVE

- vyrobeny z velmi kvalitního polysulfonu odolného proti nárazu a vysoké teplotě - možnost autoklávování do 134°C
- objem lahví: 0,25, 0,5, 1, 2, 3 a 5 litrů
- možnost propojení do série
- variabilní držáky lahví



## VÍČKA

- víčka s integrovaným těsněním jsou vylisována z jednoho druhu materiálu – polysulfonu
- díky této speciální technologii nedochází k nežádoucímu pnutí materiálu při následném autoklávování
- pojistný ventil zabraňuje přesátí
- víčko velké – pro láhve 1, 2, 3 a 5 litrů
- víčko malé – pro láhve 0,25 a 0,5 litru

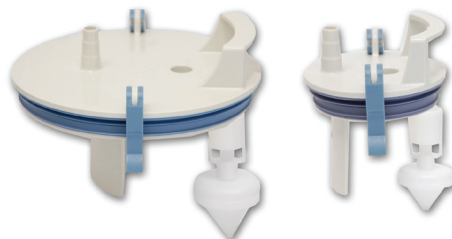

*víčko malé*

*víčko velké*

## FILTRY

- filtr bakteriologický autoklávovatelný s výměnnými jednorázovými vložkami
  - snižuje náklady na spotřební materiál
- filtry jednorázové
  - bakteriologické i proti přesátí



*filtr autoklávovatelný*

*filtr jednorázový*



**DN FORMED**  
**BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz