

Návod k použití

Miska k zachycení mléka



Miska k zachycení mléka sbírá unikající mléko z prsou a tím chrání oblečení před znečištěním. Umožňuje přístup vzduchu k poraněným nebo citlivým bradavkám. Anatomický tvar zaručuje pohodlné a diskrétní nošení. Jemný silikon je šetrný k pokožce.

Montáž a použití:

Přitlačte silikonovou membránu na misku. Ujistěte se, zda sedí přesně po celém obvodu misky. Připravenou misku vložte do podprsenky tak, aby byla bradavka uprostřed otvoru v misce a větrací otvor směřoval nahoru. Doporučujeme nošení mateřské podprsenky, která je větší a miska tak tlačí méně na prs. Misku odstraňujte opatrně, aby nedošlo k rozlití mléka. Sesbírané mléko můžete přelit do láhve. Upozornění: Použitá láhev na mléko musí být sterilní. Pokud mléko nepoužijete ihned, okamžitě jej umístěte do lednice a spotřebujte během následujících 24 hodin. Misku odstraňte každé 2-3 hodiny a nechat bradavku osušit na vzduchu.

Čištění:

Před prvním použitím a následně 1x denně

Rozložené části misky vložte do malého hrnce se studenou vodou. Doporučujeme použití destilované vody. Pokud použijete vodu z vodovodu, přidejte do ní trochu kyseliny citronové. Zabráníte tak vzniku vodního kamene. Přiveďte vodu k varu a nechte vařit asi 3 až 5 minut. Poté části vyjměte a opláchněte. Nechte usušit na suchém čistém hadříku.

Po každém použití:

Misku a membránu umyjte v jemném čistícím roztoku, opláchněte ve studené vodě a usušte na čistém hadříku.
Možnost čištění v myčce nebo autoklávu.

Výhradní zástupce a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a

612 48 Brno

Tel.: 541 321 095

Fax: 541 321 096

<http://www.dnformed.cz> (www.medela.cz)

email: dnformed@dnformed.cz