

## Návod k použití

### Nádobka na mléko při ručním odstříkání



Nádobka usnadňuje mamince sběr mléka při ručním odstříkání.

#### 1. Před prvním použitím a následně 1x denně:

Nádobku rozložte a jednotlivé části vložte do hrnce se studenou vodou. Doporučujeme použití destilované vody. Pokud použijete vodu z vodovodu, přidejte do ní trochu kyseliny citronové. Zabráníte tak vzniku vodního kamene. Přiveďte vodu k varu a nechte vařit asi 3 až 5 minut. Poté části vyjměte a opláchněte. Nechte osušit na čistém hadříku. Po každém použití:

Jednotlivé části umyjte v jemném čistícím roztoku, opláchněte ve studené vodě a usušte na čistém hadříku. Možnost čištění v myčce nebo autoklávu (buď při 134°C 3 minuty nebo při 125°C 20 minut).

2. Ruční odstříkání mléka provádějte dle pokynů odborníka.

#### **Výhradní zástupce pro ČR:**

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a, Brno, 612 48

Tel: 541 321 095

Fax: 541 321 096

<http://www.dnformed.cz>

email: [dnformed@dnformed.cz](mailto:dnformed@dnformed.cz)