

Quick Clean™ Sterilizační sáčky do mikrovlnné trouby

Návod k použití



Důležité bezpečnostní pokyny

- Sáček je určen ke sterilizaci pouze částí z umělé hmoty, která je odolná proti mikrovlnám.
- Pist a válec manuálních odsávaček Medela nelze sterilizovat v mikrovlnné troubě.
- Parní čištění může způsobit změnu barvy součástí nebo zamčení hadiček, což ale nemá vliv na správnou funkci výrobku.
- Sáček nevkládějte do konvenční pečicí trouby nebo do grilu pečicí trouby.
- Řiďte se pokyny návodu Vaší mikrovlnné trouby.

Čištění a hygiena

- Pro všechny následující popsané postupy čištění používejte výhradně kvalitní pitnou vodu.
- Jednotlivé části odsávačky čistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.
- Dodržujte následující pokyny, pokud Vám lékař či porodní (laktiční) asistentka neseďelí jiné instrukce.


Instrukce

Do jednoho sáčku lze vložit buď:

- 1 prsní nástavec, ventil, membránu, lahev na mléko (150 ml) a uzávěr nebo
- 2 prsní nástavce, ventily a membrány nebo
- 2 lahve na mléko (150 ml) a uzávěry nebo
- hadičky odsávačky



Rozložte jednotlivé díly a důkladně omyjte v teplé mýdlové vodě. Důkladně opláchněte čistou vodou.

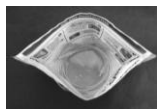

Vložte buď

- 1 prsní nástavec, ventil, membránu, lahev na mléko (150 ml) a uzávěr nebo
- 2 prsní nástavce, ventily a membrány nebo
- 2 lahve na mléko (150 ml) a uzávěry do sáčku.

Odsávací hadičky položte přímo na dno sáčku.

Do sáčku s hadičkami nepřidávejte žádné další části.



Pro prsní nástavce, ventily a membrány nebo lahve na mléko: Přilejte do sáčku 60 ml vody.



Pro hadičky odsávačky: Přilejte do sáčku 120 ml vody. Přesvědčete se, že jsou hadičky zcela ponořeny ve vodě.

- Přidáním čajové lžičky kyseliny citrónové do vody zamezíte usazování vodního kamene.
- Nelijte do sáčku méně nebo více vody než je výše uvedeno.
- Při použití méně než 60 ml/120 ml může dojít k deformaci umělohmotných částí.



Pevně uzavřete sáček. Umístěte sáček do středu otočného talíře. Nepokládejte sáček na kovovou mřížku, která někdy bývá součástí mikrovlnné trouby.



Sterilizujte v mikrovlnné troubě dle jejího výkonu po dobu:

1.5 minuty při 1100 W+	3 minuty při 800 - 1100 W	5 minut při 500 - 700 W
------------------------	---------------------------	-------------------------

Ohřívání po dobu delší než je doporučeno může způsobit deformaci umělohmotných částí. Nemá-li Vaše mikrovlnná trouba otáčecí talíř, otočte sáček v polovině zahřívací doby.



V tepelně izolujících rukavicích opatrně vyjměte sáček z mikrovlnné trouby.



Před otevřením sáčku vylijte vodu odpařovací štěrbínou.

Upozornění

Při vyjímání sáčku z mikrovlnné trouby a při jeho otevření může unikat horká voda nebo pára (nebezpečí spálení).



Vyjměte části ze sáčku a osušte je čistou utěrkou. Jestliže vyčištěné díly nejsou používány, uložte je do čistého sáčku, který důkladně uzavřete nebo do krabice s víkem. Případně lze čisté díly zabalit do čistého papíru nebo utěrky.

Výhradní distributor pro ČR:
DN FORMED Brno s.r.o.
Hudcova 76a, 612 48, Brno
Tel.: 541 321 095
Fax: 541 321 096
<http://www.medela.cz>
email: dnformed@dnformed.cz