



Speciální savička na krmení Soft Cup je určena pro děti se sacími obtížemi. Je to vynikající alternativa krmení z hrníčku.


Montáž:


1. Nasadte membránu na ventil tak, aby těsnila. Polohu membrány a ventilu dodržujte dle obrázku nahoře.

2. Nalijte do láhve potřebné množství mléka. Mléko by mělo být v pokojové teplotě.

3. Složený ventil s membránou položte na hrdlo láhve (ujistěte se, že membrána a vyšší okraj ventilu směřují nahoru).

4. Protáhněte savičku víčkem a našroubujte na láhev.

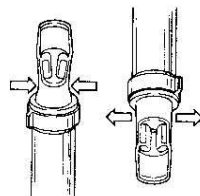Naplnění zásobníku:

STISKNOUT UVOLNIT

1. Držte savičku svisle a odstraňte vzduch ze zásobníku stlačováním náustku.


2. Nechte náustek stlačený a otočte SoftCup obráceně.

3. Po uvolnění se náustek naplní mlékem.

4. Během krmení se náustek doplňuje stlačením náustku.

Krmení dítěte:

1. Držte savičku horizontálně, tak aby spodní část láhve směřovala nahoru. Držení je velmi podobné držení tužky. Tato poloha držení savičky je nezbytná pro automatické doplňování zásobníku.

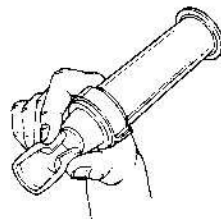

2. Mléko začne téct po jemném stlačování zásobníku a náustek se naplní.

3. Koncem náustku se dotkněte dětských rtů. Spodní okraj náustku položte na dolní ret dítěte.

4. Nakloňte savičku tak, aby mléko v náustku nateklo dítěti do pusy.

Čištění a sterilizace:
Před prvním použitím a následně 1x denně:

Rozložené části SoftCupu vyvařte 3 až 5 minut ve vodě. Abyste předešli vzniku vodního kamene, doporučujeme použití destilované vody.

Jestliže používáte SoftCup v nemocnici, rozložené části mohou být autoklárovány 3 minuty při 134°C nebo 15 minut při 125°C. Abyste se vyhnuli poškození v průběhu sterilizace, sterilizujte bez používání vnějších tlaků.

Po každém použití:

Doporučujeme čistit SoftCup po každém použití. Je-li v dudlíku nějaké zbylé mléko, držte SoftCup před rozšroubováním v horizontální poloze nad dřezem. Ventil by měl zůstat v zásobníku, aby zabránil rozlití mléka.

Rozmontujte SoftCup, ujistěte se, že ventil je oddělen od zásobníku. Vylijte zbylé mléko, všechny části omyjte v horké mýdlové vodě, a poté opláchněte ve studené vodě. Na čištění nepoužívejte kartáčky, aby nedošlo ke vzniku prasklinek. Nechte osušit na suchém, čistém ručníku.

Užitečné tipy:
Zásobník se nenaplnuje správně:

Ujistěte se, že je v zásobníku dírka. Použijte větší tlak prstů při naplňování zásobníku.

Zásobník se nedoplňuje automaticky:

Jestliže používáte zahušťovac doplňky, zkontrolujte správnou cirkulaci vzduch (zda ner blokována).

Netěsnící savička:

Jestliže savička netěsní zkontrolujte správné zmontování SoftCupu. Membrána musí sedět přesně na ventilu (viz obrázek montáž). Zkontrolujte také správné našroubování víčka na láhev. Savička je navržena pro použití v pokojové teplotě a neměla by být používána pro horké tekutiny. Zkontrolujte, zda není bu membrána nebo ventil poškozen a nepotřebuje vyměnit.

Materiál:

Zásobník a membrána: Silikon
Ostatní části: Polypropylen

Objednávková specifikace:
Obj. č. Popis

820.7004 Dudlík ve tvaru lžičky
820.0014 Membrána
810.0503 Ventilek
810.7066 Šroubov. uzávěr
810.0137 Lahvička, 80 ml